

Ogni dettaglio, tutti i giorni



OXY CONTACT PLUS MONTHLY MULTIFOCAL

Protocollo applicativo lenti a contatto mensili

zeiss.it/vision



Seeing beyond

Oxy Contact Plus Monthly Multifocal

PROTOCOLLO APPLICATIVO

1

Anamnesi e controlli preliminari

- Informarsi sulle abitudini e sulle esigenze visive
- Chiedere l'età del portatore
- Riportare la prescrizione in uso (LAC o Occhiale)
- Creare il profilo visivo del portatore utilizzando la webapp il "Mio Profilo Visivo ZEISS"
- Menisco lacrimale: verificare in base al metodo preferito (BUT, NIBUT, lampada a fessura ecc.)
- Misurazione e valutazione diametro pupillare (utile durante le valutazioni di centraggio post applicazione)
- Valutazione Raggi Corneali (K medio)
- Determinare la dominanza sensoriale



2

Refrazione

- Aggiornare la refrazione per lontano per ottenere il miglior comfort binoculare
- Calcolare il potere iniziale per lontano partendo da una nuova prescrizione, dopo aver compensato la distanza del vertice.
In caso di prescrizione astigmatica, calcolare l'equivalente sferico:
potere lente = sfera + (1/2 cilindro)
- Evitare di applicare in presenza di cilindri superiori a 0,75 D)
- Assegnare l'addizione arrotondando per difetto al valore disponibile più vicino

3

Applicazione e controlli

- Considerare un raggio corneale medio maggiore di 7,60 mm
- Applicare la prima lente di prova con poteri e addizione ricalcolati come precedentemente descritto
- Attendere dai 30 ai 60 minuti, per permettere la stabilizzazione ottimale del film lacrimale
- Verificare centratura e sovra-refrazione binoculare (massimo positivo da lontano)



Acquista su Shop on line
dal portale MyZEISS
per avere la consegna gratuita

Per informazioni:

Tel. 199 11.55.00 - email: ordini@zeiss.com
Oppure il tuo Responsabile Commerciale ZEISS

4





Rifinitura e indicazioni all'uso

VALUTAZIONE DEL LONTANO

- Se la visione a distanza non è adeguata alle esigenze cercare la migliore acuità data da massimo positivo o minimo negativo, aggiungendo all'**occhio dominante** +0,25 oppure -0,25, fino a raggiungere la migliore visione possibile a distanza
- Se la visione a distanza non è ancora sufficiente, diminuire il valore dell'addizione sull'**occhio dominante o su entrambi** (vedi schema sotto)

VALUTAZIONE DEL VICINO

- Se la visione da vicino non è adeguata alle distanze usuali con entrambi gli occhi aperti e utilizzando un occhialino di prova o un flipper, aggiungere +0.25 o +0.50 all'occhio **non dominante** fino a causare la sfocatura per lontano
- Se la visione da vicino non è ancora sufficiente aumentare il valore dell'addizione sull'occhio **non dominante o su entrambi** (vedi schema sotto)

	Vicino + + 	Vicino - - 
Lontano + + 	Non modificare addizione	Aumentare addizione in entrambi gli occhi
Lontano - - 	Diminuire addizione in entrambi gli occhi	Diminuire addizione dell'occhio dominante

Oxy Contact Plus Monthly Multifocal **BENEFICI**

COSA TI OFFRIRANNO

- Libertà dagli occhiali per la maggior parte delle attività
- Buona visione a distanza, intermedio e da vicino
- Elevato tempo di utilizzo grazie all'ottima ossigenazione
- Ampia scelta di addizioni per ogni esigenza

E COSA NO

- La stessa visione di quando si aveva 20 anni
- Che non servono più gli occhiali da lettura
- La visione attraverso gli occhiali sia comunque sempre migliore

Oxy Contact Plus Monthly Multifocal

DATI TECNICI


TECNOLOGIA WATER GRIP

Grazie alla particolare conformazione del macromero Innofilcon, **OXY CONTACT PLUS MONTHLY** aggancia le molecole d'acqua abbassando l'angolo di contatto e mantenendo un'alto coefficiente di lubrlicità.

Singola lunga catena di siloxano

Agente umettante

Acqua

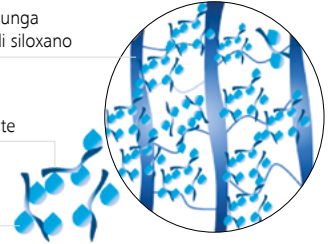

Materiale: INNOFILCON A



Raggio base: 8,6

Dk: 88

Diametro: 14,2

H2O: 45%

Modulo di elasticità (MPA): 0,80

Tinta di manipolazione: Azzurro

Protezione UV: Classe II

Pack: 3 pezzi

Spessore al centro: 0,12


Dk/t (-3,00): 73

Design: Centro vicino

Poteri sferici: da -12,00 a -6,50 (Step 0,50)
da -6,00 a +5,00 (Step 0,25)
da +5,50 a +6,00 (Step 0,50)

Addizione: da 1,00 a 2,50 (Step 0,50)

Codice / Classe: RCT00 / 915

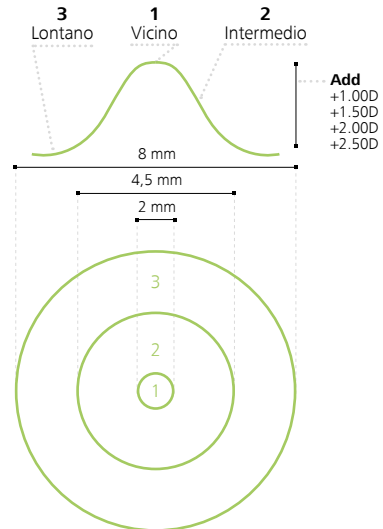

Carl Zeiss Vision Italia Spa

Via S. e P. Mazzucchelli, 17
21043 Castiglione Olona (VA)
Italia

www.zeiss.it/vision

 ZEISS Vision Care